

# Инструкция по установке защитного чехла на кресло Digiterm Comfort - 2



## Чехол на подголовник:

Проденьте ленту с грузиком подголовника сквозь специальное отверстие в чехле. Наденьте чехол на подголовник и скрепите контактной лентой.

## Чехлы на подлокотники:

Наденьте чехлы на подлокотники таким образом, чтобы вертикальный шов борта оказался со стороны спинки кресла. Зафиксируйте стропы с контактной лентой, расположенные снизу изделия - по 2 пары на каждом подлокотнике.

## Чехол на кресло:

0. Расправьте чехол и определите верх и низ изделия. Верх изделия характеризует большой капюшон с вырезом для крепления подголовника, на нижней части изделия - маленький капюшон.
1. Наденьте нижнюю часть изделия на матрас кресла, зафиксировав капюшон на металлической раме кресла.
2. Расправьте чехол по сиденью до нижней части спинки и убедитесь, что изделие село ровно, без перекосов и ни за что не зацепилось.
3. Наденьте верхнюю часть изделия, зафиксировав капюшон на металлической раме кресла. Вырез на капюшоне должен совпадать с креплением подголовника.
4. Согласно схеме, под пунктом номер 4, с обеих сторон изделия расположены стропы с контактной лентой. С небольшим усилием подтяните борт в сторону спинки кресла и зафиксируйте стропу за металлическую сетку с нижней стороны кресла.
5. Согласно схеме, под пунктом номер 5, с обеих сторон изделия расположены стропы с контактной лентой. С небольшим усилием подтяните борт вниз и зафиксируйте стропу за металлическую сетку.
6. Участок борта защитного чехла, расположенный между 4 и 5 пунктом, необходимо заправить под матрас кресла, а его стропы зафиксировать за металлическую сетку с внутренней стороны кресла.

